

Sauberkeit und Frische



ECOSYM® Gel und Zahnprothesenbürste für die tägliche Reinigung.

ECOSYM® gel et la brosse pour prothèses dentaires pour le nettoyage quotidien.



ECOSYM® FORTE Intensiv-Reiniger und Aufbewahrungsbox für das wöchentliche Reinigungsbad und bei hartnäckigen Flecken.



ECOSYM® FORTE nettoyant intensif et la boîte pour prothèses dentaires pour le nettoyage hebdomadaire et des taches les plus tenaces.

Alle **ECOSYM®** Pflegeprodukte im Set zum Vorzugspreis.

Tous les produits de soins **ECOSYM®** dans le set à un prix avantageux.



Propreté et fraîcheur

Schutz der Restbeziehung

EMOFLUOR® Gel zur Intensivbehandlung, **EMOFLUOR®** Zahnpaste und Mundspülung zur täglichen Pflege.



EMOFLUOR® gel pour le traitement intensif, **EMOFLUOR®** dentifrice et bain de bouche pour les soins quotidiens.

Protection des dents restantes

Schmerzhafte Prothesendruckstellen

GINVAPAST® mit den Vitaminen A und D sowie Calcium stärkt die Widerstandskraft des Zahnfleisches und begünstigt die Wundheilung.

GINVAPAST® contient les vitamines A et D et du calcium, renforce la capacité de résistance des gencives et favorise la guérison des plaies.



1–2 Sprühstöße mit dem **DEAFTOL®** Mundspray in den Wundbereich wirken sofort schmerzstillend und unterstützen den Heilungsprozess. **DEAFTOL®** gibt es auch als **Tablette**, welche man langsam im Wundbereich zergehen lässt.

1–2 nébulisations avec le **DEAFTOL®** spray buccal sur la partie à traiter ont un effet analgésique immédiat et soutiennent le processus de guérison.

DEAFTOL® existe également sous forme de comprimé qu'on laisse fondre sur la partie à traiter.



Pressions douloureuses sous la prothèse

Irritationen am Zahnfleisch und der Mundschleimhaut

TEBODONT® Gel, Mundspülung, Spray und Zahnpaste enthalten Teebaumöl, aus dem australischen Teebaum (*Melaleuca alternifolia*).

- hemmen die Plaquebildung
- pflegen und kräftigen das Zahnfleisch

TEBODONT® gel, bain de bouche, spray et dentifrice contiennent de l'huile extraite de l'arbre à thé australien (*Melaleuca alternifolia*).

- préviennent la formation de la plaque
- soignent et fortifient les gencives



Irritations des gencives et de la muqueuse buccale

Tipps für die Dritten...

- mehr Sauberkeit und Frische
- guter Sitz und sichere Haftung
- Prothesendruckstellen



Conseils pour votre prothèse dentaire...

- plus de propreté et de fraîcheur
- bonne stabilité et adhérence
- pressions sous la prothèse

ECODENT 2. 20'000.5.2007

Die Zahn-, Total- oder Teilprothesen sowie kieferorthopädischen Apparate müssen ebenso gründlich gereinigt und gepflegt werden wie die eigenen Zähne, da sie vom gleichen Milieu (Mundflora und Speichel) umgeben sind.

DENTOFIX® REGULAR und **DENTOFIX® FORTE** sind **Haftpulver**, welche eine hauchdünne Schicht zwischen der starren Zahnprothese und dem weichen und empfindlichen Gaumen bilden. Sie geben der Prothese einen sicheren Halt und fangen einen Teil des Kaudrucks ab. **DENTOFIX® FORTE** ist geschmacksneutral, ohne Pfefferminzöl und eignet sich auch für Menschen, welche homöopathische Mittel einnehmen. Die **DENTOFIX® EXTRA FORTE Zahnhaftcreme** gibt Ihnen nicht nur ein angenehmes, frisches Gefühl, sondern Sicherheit für volle 12 Stunden. Obwohl sie über eine extra starke Haftkraft verfügt, lässt sie sich problemlos reinigen, am besten mit **ECOSYM® Gel** und **Zahnprothesenbürste**.

Für die tägliche Reinigung geben Sie ein paar Tropfen **ECOSYM® Reinigungs-Gel** auf die Prothese und bürsten alle Flächen während einiger Sekunden. Die spezielle Form der **Zahnprothesenbürste** erlaubt eine optimale Reinigung. Auch Prothesenhaftmittel lassen sich leicht und vollständig entfernen. Für die wöchentliche Reinigung bereiten Sie mit **ECOSYM® FORTE** und Wasser ein Reinigungsbad in der **ECOSYM® Aufbewahrungsbox** zu und legen die Prothese während mind. 1 Stunde oder über Nacht ein. Damit entfernen Sie mühelos auch hartnäckige Beläge von Nikotin, Rotwein, Kaffee und Zahnstein. Die **ECOSYM® Pflegeprodukte** reinigen vorzüglich, ohne den Prothesenkunststoff anzugreifen oder zu bleichen. Die Aromastoffe geben der Prothese einen frischen Geschmack und beugen Mundgeruch vor. Sie eignen sich auch für die Reinigung von Metallteilen.

Welche Art von Haftmittel am geeignetsten ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Menschen mit starker Speichelbildung sind am besten mit einem Haftpulver bedient, bei wenig Speichel ist eine Zahnhaftcreme angenehmer. Zahnhaftcremes federn den Druck besonders gut ab und unterfüttern Hohlräume, die durch Knochenschwund entstanden sind.

DEAFTOL® Spray lindert bei Prothesedruckstellen sofort den Schmerz und wirkt entzündungshemmend. Deaftol ist ein Arzneimittel, bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

EMOFLUOR® Gel und **Zahnpaste** enthalten Zinnfluorid und sind zum Kariesschutz der Restbezaehlung sehr wirksam. **EMOFLUOR® Mundspülung** mit Mineralsalzen regt die Speichelproduktion an und ist zur täglichen Spülung geeignet.

GINVAPAST® mit Vitamin A, D und Procain stärkt die Widerstandskraft der Mundschleimhaut, begünstigt die Wundheilung und lindert Schmerzen. Ginvapast ist ein Arzneimittel, bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

TEBODONT®-Pflegeprodukte sind zur Pflege der Mundschleimhaut und Vorbeugung von Irritationen am Zahnfleisch sehr empfehlenswert. **Gel, Mundspülung, Spray** und **Zahnpaste** enthalten Teebaumöl, hemmen wirksam die Plaquebildung und kräftigen das Zahnfleisch. **TEBODONT® Zahnpaste** verleiht einen langanhaltenden frischen Atem.

Alle Produkte sind ausschliesslich in Apotheken und Drogerien erhältlich.

Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmässig durch Ihren Zahnarzt / Ihre Zahnärztin überprüfen.

Les prothèses dentaires totales ou partielles ainsi que les appareils orthodontiques doivent être nettoyés et entretenus aussi soigneusement que les dents naturelles, puisqu'elle se trouvent dans le même milieu (flore buccale, salive).

DENTOFIX® REGULAR et **DENTOFIX® FORTE** sont des **poudres adhésives** qui forment une couche très fine entre la prothèse dentaire rigide et le palais mou et sensible. Ils assurent à la prothèse un maintien sûr et retiennent une partie de la pression lors de la mastication. **DENTOFIX®** est insipide, exempt d'essence de menthe et par conséquent peut être utilisé par des patients sous traitement homéopathique. **DENTOFIX® EXTRA FORTE crème de fixation** pour prothèse vous donne non seulement une sensation agréable et fraîche, mais également une sécurité durant 12 heures. Malgré son pouvoir d'adhésion extra fort, elle peut être nettoyée sans problème, de préférence avec **ECOSYM® Gel** et la **brosse pour prothèse dentaire**.

Pour le nettoyage quotidien, appliquez quelques gouttes du **gel nettoyant ECOSYM®** sur la prothèse et brossez toutes les surfaces pendant quelques secondes. La forme spéciale de la brosse pour prothèse dentaire permet un nettoyage optimal. Elle permet également d'éliminer facilement et entièrement les produits de fixation pour prothèse. Pour le nettoyage hebdomadaire, préparez un bain nettoyant avec **ECOSYM® FORTE** mélangé à de l'eau dans la **boîte pour prothèses dentaires ECOSYM®** et déposez la prothèse au moins 1 heure ou durant la nuit. De cette façon, vous éliminez également sans difficulté les dépôts les plus tenaces de nicotine, vin rouge, café et tartre. Les **produits de soins ECOSYM®** permettent un excellent nettoyage, sans agresser ni blanchir les matières synthétiques de la prothèse. Les arômes donnent à la prothèse un goût frais et préviennent la mauvaise haleine. Ils conviennent également

pour le nettoyage des parties métalliques.

Le choix du produit d'adhésion le mieux approprié dépendra des besoins individuels. Des personnes ayant une forte production de salive seront mieux servies avec une poudre de fixation, en présence de peu de salive, une crème d'adhésion dentaire est plus agréable. Les rembourrages avec le produit d'adhésion permettent d'amortir la pression et remplissent les interstices qui se sont formées suite à la régression des gencives.

Le **spray buccal DEAFTOL®** soulage immédiatement la douleur provenant de points de pressions sous la prothèse dentaire et agit contre les inflammations. Deaftol est un médicament, veuillez lire la notice d'emballage.

EMOFLUOR® gel et **dentifrice** contiennent du fluorure d'étain et protègent efficacement les dents résiduelles contre les caries. Le **bain de bouche EMOFLUOR®** aux sels minéraux, stimule la production salivaire et convient pour le rinçage quotidien.

GINVAPAST®, contenant de la vitamine A et D ainsi que de la procaine, renforce la résistance de la muqueuse buccale, favorise la cicatrisation et apaise les douleurs. Ginvapast est un médicament, veuillez lire la notice d'emballage.

Les produits **TEBODONT®** sont spécialement recommandés pour les soins de la muqueuse buccale et pour prévenir les irritations aux gencives. **Gel, bain de bouche, spray** et **dentifrice** contiennent tous de l'huile de l'arbre à thé, ils inhibent efficacement la formation de la plaque et renforcent la gencive. Le **dentifrice TEBODONT®** rafraîchit durablement l'haleine.

Tous les produits sont exclusivement en vente dans les pharmacies et drogueries.

Faites régulièrement contrôler la stabilité de votre prothèse dentaire par votre médecin-dentiste.



DENTOFIX® REGULAR Haftpulver für eine angenehme und sichere Haftung über viele Stunden.

DENTOFIX® REGULAR poudre de fixation pour un maintien agréable et sûr durant de nombreuses heures.

DENTOFIX® FORTE Haftpulver für einen absolut sicheren Halt. Geschmacksneutral, ohne Pfefferminz, auch mit homöopathischen Mitteln verträglich.



DENTOFIX® FORTE poudre de fixation pour un maintien absolument sûr. Insipide, exempte de menthe, également compatible avec les produits homéopathiques.

DENTOFIX® EXTRA FORTE Haftcreme Sicherheit über 12 Stunden auch bei extremer Beanspruchung. Unterfüttert Hohlräume und sorgt für einen perfekten Sitz.

DENTOFIX® EXTRA FORTE crème de fixation pour une sécurité durant plus de 12 heures, également en cas de forte sollicitation. Rembourre les interstices et permet un excellent maintien.

